



Kapillærblodprøvetagning

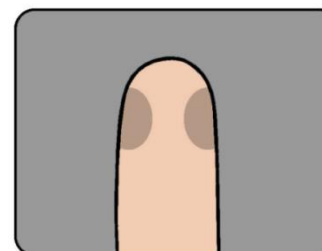

Prøvetagning fra finger

- Langfinger eller ringfinger vælges, aldrig pegefinger, tommelfinger eller lillefinger.
- Undgå at stikke i fingre med ringe.
- Desinficer indstikssted – lad alkoholen tørre/fordampe helt inden indstik.

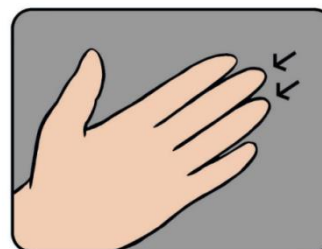



Kapillærblodprøvetagning



Prøvetagning fra finger

- Udføres kapillærmåling bør stikket lægges på siden af fingerblommen, hvor der er god blodgennemstrømning og mere sparsom nervedækning ift. fingerpulpa. Proceduren bliver derved mindre smertefuld.
- Kolde hænder varmes (f.eks. i varmt vand) før prøvetagning for at øge blodcirkulationen.
- De første 3-4 bloddråber aftørres, da dette også stimulerer blodgennemstrømningen. Undgå at massere fingeren. Hvis nødvendigt trykkes kun let mod blommen, indtil en ny bloddråbe fremkommer.


NB! Til analyse af KFTT på CoaguChek anvendes altid 1. dråbe og på Xprecia Stride 1. el. 2. dråbe.

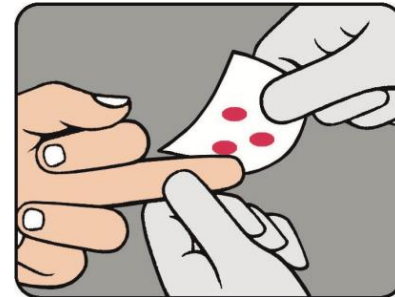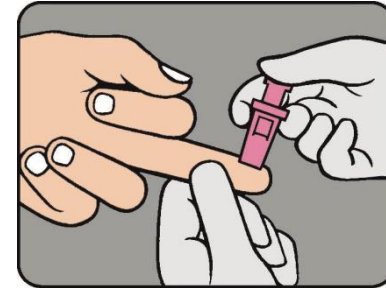

Kapillærblodprøvetagning





- Sørg for at bloddråben er stor nok til at fylde kuvetten helt på én gang.
- Før kuvettens spids ind i midten af bloddråben.
- Kuvetten skal fyldes helt på én gang.
 - Kapillærrør til QuikRead GO apparater fyldes op til den hvide stopklods.
- *Efterfyld aldrig en kuvette!*

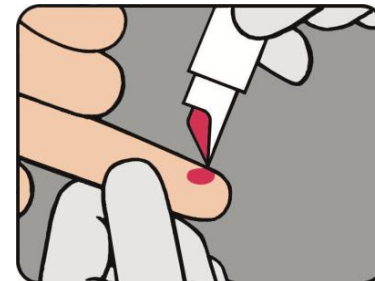

Kapillærblodprøvetagning



- Tør overskydende blod af kuvettens ydersider uden at sugе blod ud af kuvetten.
 - Ved måling på QuikRead GO apparater tørres ligeledes evt. overskydende blod af kapillærrørets yderside uden at sugе blod ud af kapillærrøret.
- På HemoCue apparater skal måling foretages indenfor:
 - Glukose max. 40 sekunder
 - Hb 201+ max. 3 minutter
 - Hb 801 max. 40 sekunder
 - WBC DIFF max. 1 minut

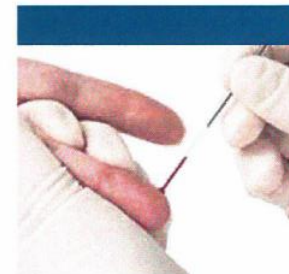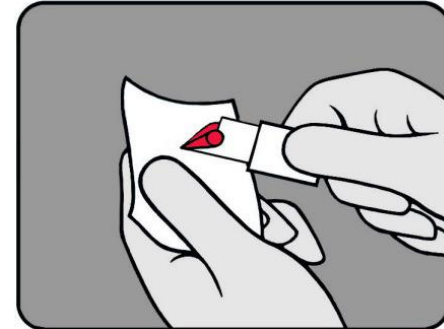

2 Fyld kapillærrøret med prøvematerialet (20 µl) op til den hvide stopklods. Kontroller, at der ikke er luftbobler i kapillærrøret. Tør eventuelt overskydende prøvemateriale af kapillærrørets yderside.