



*Laboratoriekonsulenterne*

- 5) Udfyld alle de hvide felter.  
Ved: **Prøvemateriale anvendt i praksis** vælges enten **Veneblod** eller **Fingerkapillær**.

- 6) Tryk på Gem  og Send 

Praksisnavn	Lægehuset Sønderbro	Reference laboratorium	Klinisk Diagnostisk Afsnit	Laboratoriekonsulent	Hanne Lise Pedersen	Telefonnummer	79182474
-------------	---------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	---------------	----------

*BIOKAP Parallelkontrol*

Vælg apparatur	Indtast data
Praksis apparatnavn Analysekomponent Apparatnavn LKO nummer Serienummer Maksimal tilladelig afvigelse	Prøve ID Dato for kontrol (dd-mm-yyyy) Test udfører - Navn Lot nummer reagens/kuvetter/strips Prøvemateriale anvendt i praksis Praksisværdi LKO reference værdi Kommentar
JG, Hb Hæmoglobin; B(kB) Hemocue 201+, Hb (kB) 048739.03.02 - -	    -   N/A

- 7) **Indsend papir-parallelkontrolskemaet til laboratoriekonsulenten, når alle kontroller er indtastet i LKO-databasen. Noter gerne på skemaet at resultaterne er indtastet.**

**Gældende for CRP**

Bemærk tegnet "<", ved lave CRP-målinger, må ikke anvendes i databasen. Ved et resultat på eks. <5 noteres kun tallet 5 i databasen. CRP indtastes endvidere som et helt tal, hvor der rundes op eller ned eks. indtastes 5, hvis CRP-resultatet er 4,7.



Eventuelle spørgsmål kan rettes til laboratoriekonsulenterne.